


Dragselen

Qviksplint Dragsela består av fotledssvepet

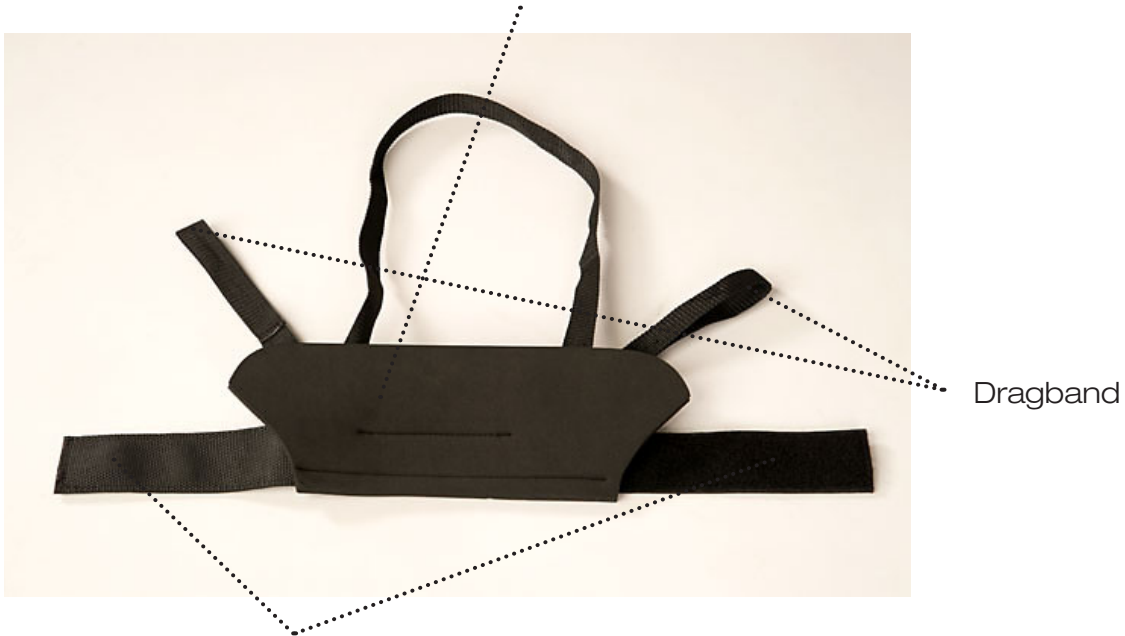

Två kardborre band på fotledssvepet



Fotledssvepet läggs under foten, kardborrebandet från ena sidan läggs över fotryggen



Kardborrebandet från andra sidan läggs utan spänning över fotryggen för att sluta till fotledssvepet.



Med dragbandet kan du påbörja dragningen av benet.

Lägg märke till att dragselens kapp glider ner efter fotens baksida och griper tag i hälbenet vilket minimerar tryck på hälsenan.



När benet lagts i Qviksplint-skenan, kopplas dragbandet över till T-bygeln.

Kraften regleras med spännen och den fjäderbelastade T-bygeln till önskad dragkraft uppnåtts

Läs mer: www.procare.se

Redargatan 6, 932 35 Ursviken, Sverige, Tel: 0910-186 40
Fax: 0910-733 532, E-mail: procare@procare.se