

LillQvik

Ett redskap för att stabilisera och fixera benbrott hos barn från c:a 3-12 år.



Väska innehållande två dynor.



Genom att ändra på kardborrebanden kan man reglera dynans omfång.



Dynan placeras så att den sticker en bit nedom foten.



Dragbandet fästs först kring knäled. Observera parallellt med varandra.



Foten stabiliseras med ett kardborreband över fotryggen och mittenbanden sträcks.



Färdig för transport.

Läs mer: www.procare.se

Redargatan 6, 932 35 Ursviken, Sverige,
Tel: 0910-186 40, E-mail: procare@procare.se